

Sterilní neutrální roztok chloridu sodného (0,9%) pro výplach očí nebo povrchových poranění.


Slouží pro výplach očí nebo oplach pokožky při poranění a popálení,
rychle navrácí tělní tekutinu na výchozí hodnotu pH 7,4.

Otevření

Odlomte vrch ampulky.
Po otevření se nedotýkejte
trysky.



Poranění, znečištění oka

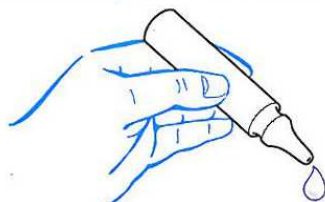

Namiřte trysku na oko a jemně
zmáčkněte ampulku.
Proplachujte kapáním nebo
proudem dokud není rána čistá.

Povrchové poranění

Namiřte trysku na ránu a
zmáčkněte ampulku.
Proplachujte, dokud není
rána čistá.



- + vhodné pro děti i dospělé
- + nepoužívejte v případě zakalení obsahu nebo porušení obalu
- + skladujte při teplotě 5 až 25°C
- + pouze pro jedno použití
- + nepoužívejte pro injekční stříkačky



Steroplast Healthcare Ltd,
Alpha Point, Bradnor Road Manchester, M22 4TE U.K.

Dodavatel: Traiva s.r.o. Pohraniční 104
703 00 Ostrava

